

Circaid® juxtalite® aantrekinstructies

Circaid® juxtalite® is een klittenbandsysteem met een ingebouwde druk markering en instructie kaart zodat u de druk helemaal zelf in kunt stellen.



Het aantrekken van de zwarte onderkous

Stap 1: plaats uw hand in de kous tot aan het voetstuk



Stap 2: keer de kous tot aan de voet binnenstebuiten



Stap 3: trek het voetgedeelte over uw hiel, tot aan de wreef



Stap 4: vouw de boord om en trek de kous rustig omhoog



Het aantrekken van het compressiesysteem

Stap 1: plaats de juxtalite® net boven de enkel en onder de knie met de zwarte kant naar de binnenkant.



! Zorg dat er geen plooien in de onderkous zitten

Stap 2: zet de bovenste 2 banden (3 en 4) losjes op het systeem vast.



Stap 3: maak de onderste banden los. Trek band 2 schuin omhoog en zet band 1 vast op het systeem.



Stap 4: maak band 3 los en trek deze schuin omhoog. Zet vervolgens band 2 vast.



Stap 5: maak band 4 los en trek deze schuin omhoog. Zet band 3 en daarna band 4 vast.



! Zorg dat de banden horizontaal zijn vastgezet zodat er geen kieren ontstaan

**Volgende pagina:
het instellen van de juiste druk**



Het instellen van de juiste druk

Het instellen van de juiste druk is eenvoudig. Hiervoor hebben we een meetkaart (BPS guide card) ontwikkeld. Het meetkaartje wordt meegeleverd in de verpakking en de juxtalite® is voorzien van strepen op het materiaal. Hiermee kan de druk eenvoudig bepaald worden. Het kan nodig zijn onderstaande stappen te herhalen in de loop van de dag om de voorgeschreven druk te behouden.

**Stap 7: houd de punt van het zwarte driehoekje op het meetkaartje bij één van de strepen op de onderste band.
Kijk op welke drukwaarde het tweede streepje uitkomt.**



Stap 8: trek de onderste band los wanneer de band meer of minder druk geeft dan voorgeschreven.



Stap 9: herhaal stap 8 bij elke band. Werk van beneden naar boven. Zorg ervoor dat alle banden op dezelfde druk zijn ingesteld.

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
T: 076 57 22 562
E: info@medi.nl
W: www.medi.nl